

Digitální alkohol tester Jednoduché měření hladiny alkoholu v krvi. Zjistěte si, kolik máte promile a vyvarujte se pokutám!

V bodech

- Přesný, spolehlivý a snadno ovladatelný osobní alkohol tester.
- Nízká hmotnost (82g) a kompaktní rozměry (11.8cm x 7cm x 2.8cm).
- Doba měření pouhých 5 sekund!
- Rozsah měření: 0,00 - 1,90 ‰.
- Automatické vypínání pro šetření baterie.
- Napájení: 2ks AAA baterie (nejsou součástí balení).
- Senzor: Polovodičové čidlo.

Doplňující informace

Osobní alkohol tester pro kontrolu hladiny alkoholu v krvi. Vhodný pro měření hladiny alkoholu před jízdou automobilem, náhodným orientačním zkouškám zaměstnanců v práci či pouze pro Vaši kontrolu po vydařené noci.

Alkohol tester – návod k použití

Základní popis: Digitální alkohol tester se zvukovou výstrahou. Rozmezí: 0,00-0,19 ‰ (0,00-1,9 promile) BAC - alkoholu v krvi (0,0-1,9 g/l). Rychlý výsledek. Automatický vypínač. Zdroj napájení: 2x AAA alkalické baterie. Baterie nejsou součástí balení. Senzor: polovodičové čidlo. Provozní teplota: 5 – 40 stupňů Celsia.

Instalace baterií:

- 1) Jemně oddělte kryt ze schránky na baterie.
- 2) Vložte 2x AAA (UM-4) alkalické baterie dle předznačené polariry.
- 3) Krytem uzavřete schránku na baterie.

Jak používat alkohol tester:

- 1) Zmáčknete jednou spínací tlačítko (delší čas), LCD display se zapne a ozve se jedno pípnutí.
- 2) Na displeji se začnou zobrazovat čísla od 10 do 00, což znamená, že alkohol tester je v zahřívacím režimu (nápis „warm up“).
- 3) Jakmile je ukončeno zahřívání odpočítáváním 10-00, tak začíná nové odpočítávání od 10-0, což znamená, že je tester v testovacím procesu (zobrazí se „blow“). V průběhu tohoto odpočítávání vydechněte do dechového inhalátoru po dobu cca 3-5 sekund.

- 4) Přečtěte si výsledek na displeji.
- 5) „Varovný signál“ je zobrazen, je-li hladina alkoholu v rozmezí 0,02 % (0,2 promile) BAC (0,2 g/l) do 0,05 % (0,5 promile) BAC (0,5 g/l).
- 6) Symbol „nebezpečí“ se zobrazí a zároveň se ozve pípání, je-li změřená hladina alkoholu v krvi v rozmezí více nebo rovno 0,05 % BAC (0,5 promile – 0,5 g/l).

Automatické vypínání:

- 1) Po zobrazení výsledku se alkohol tester po několika vteřinách sám vypne.
- 2) Pokud se proces zahřívání nepovede, tak se alkohol tester také sám vypne.
- 3) Jestliže nevydechnete do dechového inhalátoru v průběhu výše zmiňovaných 10 sekund v procesu testování, tak se na alkohol testeru zobrazí výsledek 0,00 BAC (0,0 g/l) a poté se sám vypne.

Výměna baterií: Blikání LCD displeje značí, že je nutné vyměnit baterie.

Specifikace:

Rozmezí: 0,00 % - 0,19 % BAC (0,0 – 1,9 g/l)

Zdroj napájení: 2x 1,5V AAA alkalické baterie

Rozměry: 95x36x18 mm

Odchyłka: 0,00 – 0,02 % BAC (0,0 – 0,2 g/l)

Varování:

Po požití alkoholu doporučujeme počkat přibližně 20 minut. V tomto čase se alkohol absorbuje ze střev do krve. Pro přesnější výsledek neopakujte test do 3 minut od posledního testu. Nekuřte a nejzte 20 minut před testováním. Nepoužívejte chemikálie k čištění alkohol testeru. Nefoukejte tekutiny do dechového inhalátoru. Nepoužívejte žádné dráždivé látky v blízkosti testeru, jako barvy, insekticidy, alkohol. Neumísťujte alkohol tester do prostředí, jež je kontaminováno.

Výsledek hladiny alkoholu v krvi je pouze informativní. Výrobce a dovozce nenesou žádnou právní zodpovědnost.